

Montering- och justeringsanvisning drivhjul Cross

Vid frågor kontakta Teknikernas
Servicetelefon: 060-14 96 30
Telefontid: mån-fre 08.00-11.30

Korrekt monterat drivhjul. Tapp och kula synliga enligt Bild 1 och 2



Bild 1



Bild 2

Drivhjulet kan lossna, ej i korrekt låst läge, bild 3 och 4

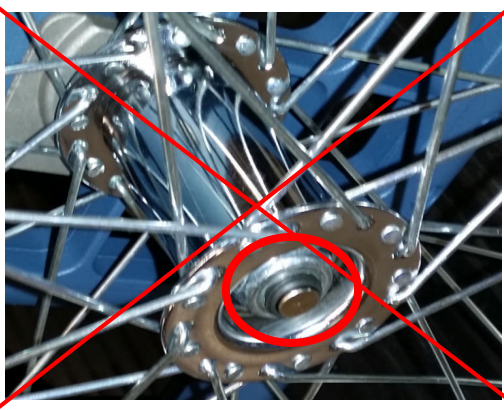


Bild 3

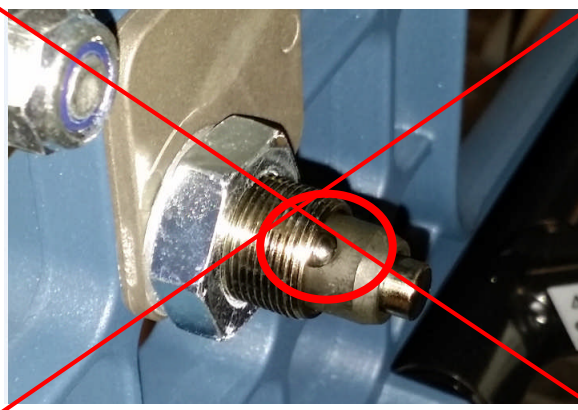


Bild 4

Justering av axel:

Görs lättast direkt på stolen. Mutter dras (bild 5) ett ½- till ¾-varv utåt eller tills tappen blir helt synlig som i Bild 1. Bild 6 visar hur axeln hålls emot för att inte snurra när muttern vrids.



Bild 5

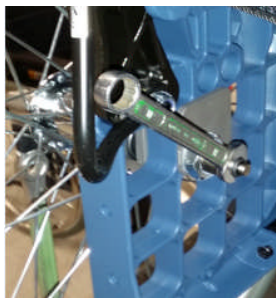


Bild 6

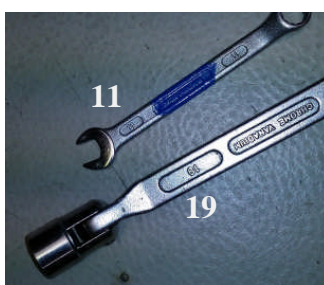


Bild 7 Verktygsdimensioner

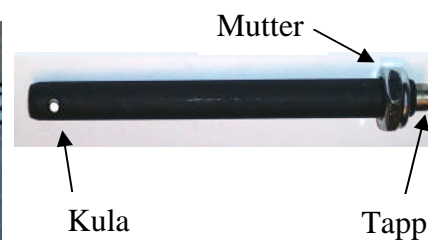


Bild 8 Axel