

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Rengöring och desinfektion av flergångsinstrument	
Godkänt av MAS i: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik		Skapad av: Hygiensjuksköterskor i samråd med medicinskt ansvariga sjuksköterskor	
Fastställt: Ny 251201	Giltigt tom: 271130	Reviderad:	Sida: 1 av 1

Gäller för flergångsinstrument, till exempel sax, pincett, peang mm, som används vid sårbehandling eller andra moment där instrumentet kommer i kontakt med kroppsvätska eller hel slemhinna.

I första hand ska instrument rengöras och desinfekteras i en diskdesinfektor för en kontrollerad och validerad process. Se vårdhygienrutin för disk- och spoldesinfektorer.

Finns inte tillgång till diskdesinfektor rekommenderas att engångsinstrument används.

En riskbedömning ska göras om verksamheten väljer att rengöra och desinfektera flergångsinstrument manuellt. Även en lokal rutin ska utarbetas och det kan göras med stöd av Vårdhandboken.

En sax med för att enbart klippa tubgas eller tejp kan rengöras och desinfekteras manuellt. Vid synlig smuts ska saxen först rengöras mekaniskt med rengöringsmedel och vatten och därefter med alkoholbaserat (45%) desinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid). Viktigt att saxen behåller sin renhetsgrad efter rengöring och desinfektion.

Relaterad information

[Vårdhandboken](#). Kemisk desinfektion av föremål

[Vårdhandboken](#). Ren och steril rutin utanför operationsenhet